



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

GERMO ACTIVE - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE SUPERFICI

GERMO ACTIVE DISINFETTANTE SUPERFICI Alcohol Free è una soluzione pronta all'uso a tripla azione: deterge, sgrassa e disinfetta rapidamente oggetti e superfici.

La formulazione di GERMO ACTIVE DISINFETTANTE SUPERFICI Alcohol Free lo rende ideale per tutti i materiali. E' pratico e facile da usare e svolge un'efficace quanto duratura azione disinfettante contro batteri, funghi, micobatteri e virus incapsulati.



ISTRUZIONI PER L'USO

Disinfezione e detersione rapida di superfici e oggetti, adatto per pulire e disinfettare dispositivi medici non invasivi come ad esempio: deambulatori, carrozzine, sedie comode, letti ortopedici, bilance, piani di appoggio, maniglie, manipoli, ecc., di studi medici, cliniche, centri estetici e ovunque siano utilizzati.

Spruzzare uniformemente gli oggetti e le superfici, lasciare agire il prodotto e successivamente passare un panno per eliminare eventuali residui, risciacquando se necessario.

Battericida e fungicida in 15'

Micobattericida e virucida in 60'.

CONFEZIONI

Codice interno: da inserire	Imballo primario:	Imballo secondario:
A306	Flacone da 750 ml	Scatola da 12 flaconi

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono allergizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

GERMO ACTIVE - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE SUPERFICI

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:
Benzalconio cloruro 2,0 g; O-fenilfenolo 0,2 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Liquido dalla colorazione variabile (da incolore a verde tenue). Profumo caratteristico.

ATTIVITÀ

L'azione sinergica del Benzalconio Cloruro e dell'O-fenilfenolo garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV).

Norma	Attività	Tempo di contatto
EN13727/EN14561/EN13697	Battericida	15 minuti
EN13624/EN14562/EN13697	Fungicida	15 minuti
EN14348	Micobattericida	60 minuti
EN14476	Virucida	60 minuti

AVVERTENZE

Per uso professionale. Agitare bene prima dell'uso. Non usare in presenza di altri saponi o detersivi.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI